

# Vastzethandleiding Veilig Vervoer Rolstoelzittenden voor Taxichauffeurs

Deze instructie gaat over het vastzetten van rolstoelen en rolstoelzittenden in een taxibus. Het in- en uitrijden en andere zaken die belangrijk zijn bij het rolstoelvervoer worden hierin niet behandeld. Kijk voor meer informatie in de Handleiding Veilig Vervoer Rolstoelzittenden voor chauffeurs. Deze is gratis te downloaden op [www.veiligvervoer.nl](http://www.veiligvervoer.nl)



## 1. De rolstoel vastzetten met spanbanden



- ⚠️ Laat een rolstoeler altijd overschuiven naar een passagiersstoel als hij dit kan. Lukt dit niet, dan kan hij tijdens de rit alleen in de rolstoel blijven als de rolstoel daarvoor geschikt is!
- ⚠️ Gebruik bij voorkeur een vastzetsysteem met ISO 10542 op het label; dit biedt de grootste veiligheid! Een deltasysteem voldoet hieraan niet, maar is (nog) toegestaan in bussen die vóór 1 september 2008 in gebruik genomen zijn.
- ⚠️ Gebruik **NOOIT** kapot of beschadigd materiaal. Meld gebreken direct bij uw werkgever!

1. Rijd de rolstoel naar de rolstoelplaats in de rolstoelbus. Zorg dat de rolstoel recht staat (in de rijrichting) en zet hem op de rem.
2. Zet de rolstoel aan voor- én achterkant met spanbanden vast (4 in totaal). Zet de 4 spanbandhaken vast aan de vastzetogen op de rolstoel of aan het vaste deel van het rolstoelframe. Zorg dat de spanbanden een hoek van 45 graden naar beneden maken (zie afbeelding).


Ontbreken vastzetogen op de rolstoel, zoek dan vier stevige punten aan het vaste deel van het frame waar de haak niet vanaf kan glijden (vlak onder de vier hoekpunten van de zitting). Het beste zijn vastzetpunten, aangegeven met een haaksymbool of rode markeerpunten. Lees verder hoe u spanbanden veilig vastzet.




- ⚠️ Bekijk de rolstoel goed en neem de tijd voor het vastzetten. Aandacht voor veiligheid is heel belangrijk, ook als er weinig tijd is.

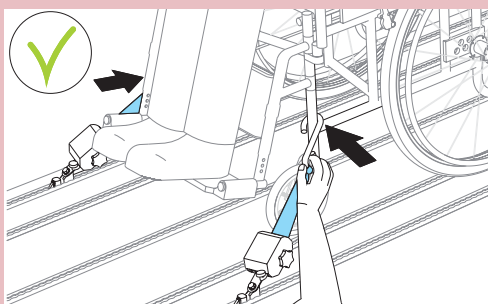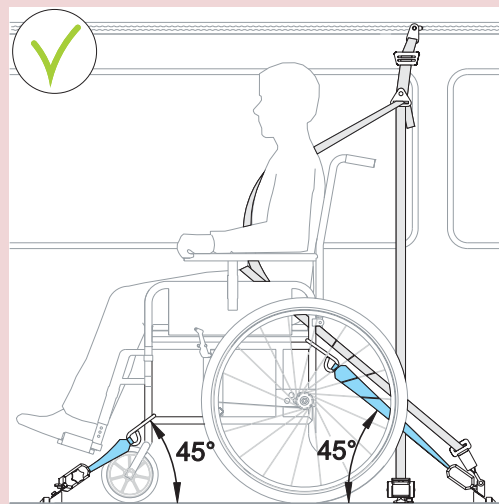


3. Zet de voorkant van de rolstoel vast met 2 spanbanden.

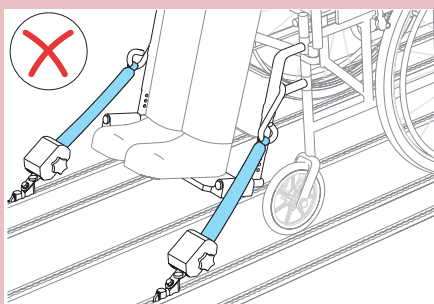


- ⚠️ Maak spanbanden **NOOIT** aan beensteunen vast, die kunnen afbreken!

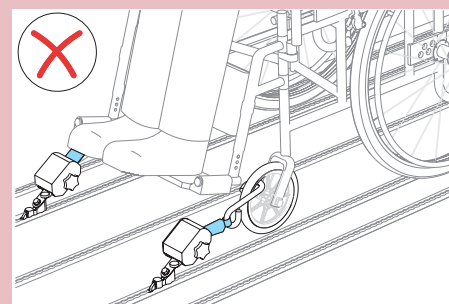


- ⚠️ Maak de spanbanden **NOOIT** aan de wielen vast, dat is geen stevig punt!

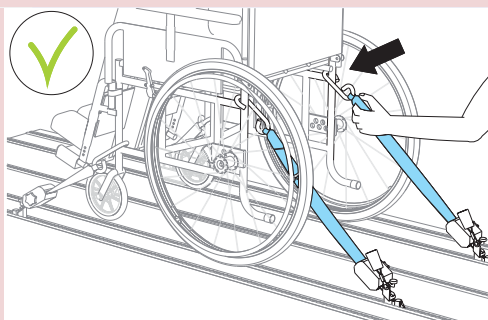


4. Maak ook de achterkant van de rolstoel vast met 2 spanbanden.

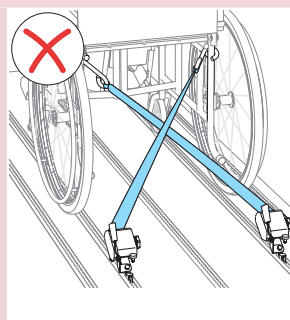

- ⚠️ Zet spanbanden **NOOIT** gekruist vast, hiervan gaat de rolstoel stuk.

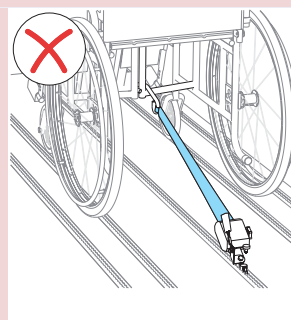

- ⚠️ Gebruik **NOOIT** maar 1 band voor of achter, zet de rolstoel aan beide zijden met 2 spanbanden vast.

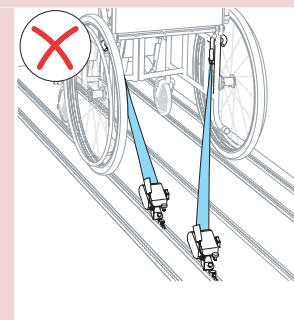


- ⚠️ Zet spanbanden **NOOIT** ongelijk naar één kant vast, dat is niet stevig bij een aanrijding.


5. Zorg dat de spanbanden links en rechts in dezelfde hoeken staan.
6. Span alle spanbanden aan totdat de rolstoel niet meer kan bewegen. Controleer of de rolstoel goed vaststaat.
7. Zet de passagier vast in de veiligheidsgordel (zie vastzetinstructie 2).


## 2. De passagier vastzetten met een veiligheidsgordel



1. Gebruik een 3-punts gordel, indien aanwezig, anders een heupgordel.
2. De gordel moet vastzitten aan het vastzetsysteem of aan het voertuig. De schoudergordel moet altijd boven aan de zijwand bevestigd zijn.
3. De gordel moet goed aansluiten en langs de armleuningen direct over de heup van de passagier lopen.

 De gordel mag niet over de armsteunen en wielen van de rolstoel lopen.


4. Een driepuntsgordel moet schuin over het lichaam naar de schouder lopen en **NOOIT** over de hals van de passagier. Verstel het bovenste punt van de gordel indien nodig.
5. Trek de gordel aan tot hij licht aangespannen is en nog comfortabel voor de passagier.

 Een gordel die bedoeld is om te voorkomen dat de rolstoel uit de rolstoel valt is **niet** geschikt als veiligheidsgordel. De rolstoel moet dan een extra autogordel om. De enige uitzondering is een rolstoelgordel met een label waarop staat dat hij voldoet aan ISO 7176-19.


 Soms moeten accessoires of losse onderdelen van de rolstoel verwijderd worden. Zet deze apart vast.

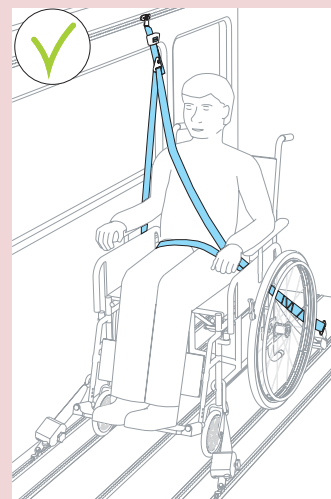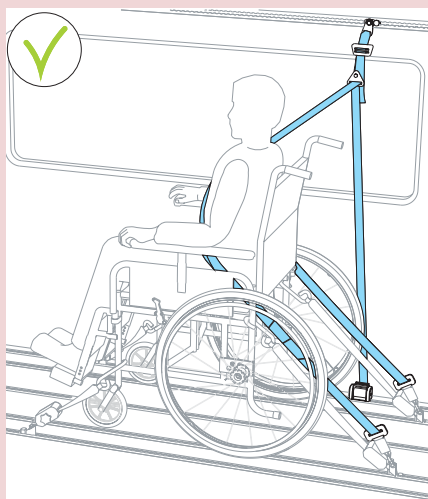



## 3. De rolstoel vastzetten met een deltasysteem.

 Zet de rolstoel alleen vast met een deltasysteem (Biermanklem) als het vastzetten met een spanbandensysteem met ISO 10542 niet mogelijk is. Gebruik geen deltasysteem in bussen die na 1 september 2008 in gebruik genomen zijn.

1. Rijd de rolstoel naar de rolstoelplaats in de bus.
2. Kijk of de dwarsbeugel goed past aan de achterkant van de rolstoel.
3. Maak de dwarsbeugel vast aan de framebuizen van de rolstoel of aan speciale opzetstukken. Draai de beveiligingsknoppen en pallen dicht.
4. Zet de deltasteun vast in de vloerrails.
5. Rijd de rolstoel achteruit tegen de deltasteun.

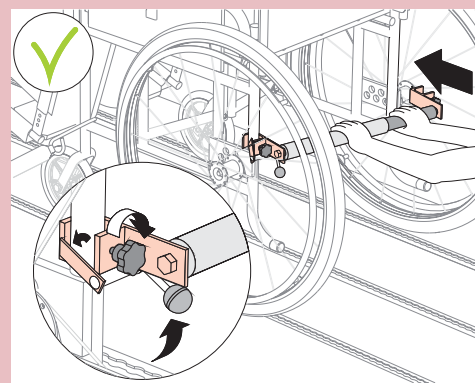

6. Zet de dwarsbeugel aan de deltasteun vast met de knevelpen.
7. Zet de rolstoel ook aan de voorkant vast met twee spanbanden.
8. Zet de passagier vast in de veiligheidsgordel die is bevestigd aan het deltasysteem of aan het voertuig (zie vastzetinstructie 2).

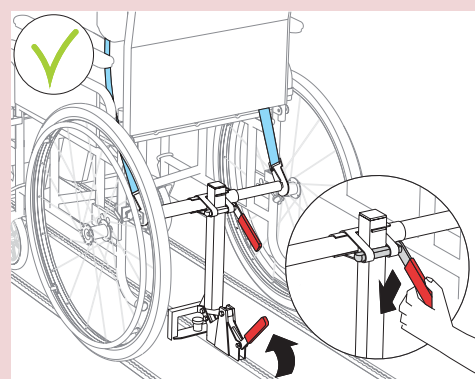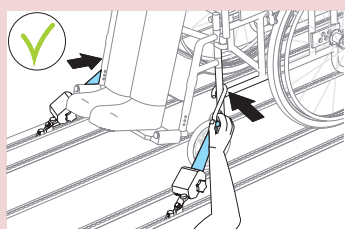

<sup>1</sup> Kijk voor meer informatie in de Handleiding Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden voor Chauffeurs.