

Vastzetten van de rolstoel.

Stap 1:

Druk op de knop op het dashboard met het rolstoelicoontje er verschijnt een rood lampje.



Stap 2:

Plaats de rolstoel op de gewenste plek.



Stap 3:

Druk op het corresponderende knopje van de rolstoelplek in de hemel. (spanbanden aan voorzijde rolstoel zijn nu los)



Stap 4:

Bevestig de spanbanden aan de voorzijde van de rolstoel.



Stap 5:

Druk vervolgens weer op het corresponderende knopje in de hemel. (spanbanden aan voorzijde zijn nu vergrendeld)



Stap 6:

Bevestig de achterste spanbanden aan de rolstoel.



Stap 7:

Haal de heupgordel / driepuntsgordel uit de vloer en plaats deze over de rolstoelinzittende.



Stap 8:

Rolstoel zit vast, druk voor het rijden gaan nog op de knop op het dashboard met het rolstoelicoontje. Het rode lichtje is nu uit. U kunt gaan rijden.



Losmaken van de rolstoel.

Stap 1:

Druk op de knop op het dashboard met het rolstoelicoontje er verschijnt een rood lampje.



Stap 2:

Ga naar de gewenste rolstoel en verwijder de heupgordel / driepuntsgordel.



Stap 3:

Ga nu naar de achterkant van de rolstoel en ontgrendel de spanbanden aan de achterzijde. (deze zijn individueel te ontgrendelen door de rode knop in de vloer in te drukken)



Stap 4:

Nadat de achterzijde van de rolstoel ontgrendeld is drukt u het corresponderende knopje in de hemel in. (De voorste spanbanden worden nu ontgrendeld).



Stap 5:

Verwijder de spanbanden aan de voorzijde van de rolstoel.



Stap 6:

De rolstoel is nu los en kan naar de lift gereden worden.